

# Information Akku-Systeme

## Der Vorteil eines Akku-Systems (Batterie-Systems)

Dank des Akku-Systems haben Sie kein störendes Netzkabel mehr. Um sicherzustellen, dass Ihr Fitform-Sessel mit Batterie-System dauerhaft funktioniert, ist es wichtig, dass Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig befolgen.

## Welche Akku-Systeme gibt es?

Es gibt 3 unterschiedliche Akku-Systeme, mit denen Ihr Fitform-Sessel ausgestattet werden kann. Diese Systeme unterscheiden sich durch die verwendete Handbedienung Ihres Sessels und das zugehörige Ladekabel. In der folgenden Übersicht wird für jedes System erläutert, zu welcher Handbedienung und Ladekabel es gehört. Außerdem finden Sie klare Gebrauchsanweisungen und Hinweise.

Unabhängig davon, mit welchem System Ihr Sessel ausgestattet ist, ist es immer wichtig, dass der Akku rechtzeitig aufgeladen wird. Wir empfehlen Ihnen, Ihr Akku-System sofort nach Lieferung 12 Stunden lang aufzuladen. Der Sessel kann während des Ladevorgangs normal benutzt werden. Auch in anderen Situationen, in denen der Sessel längere Zeit nicht benutzt wird (z. B. während eines Urlaubs), ist es ratsam das Akku-System sofort aufzuladen, wenn Sie den Sessel wieder in Betrieb nehmen.

## Akku-System 1 (Bleibatterie)

### Die Wichtigkeit des rechtzeitigen Ladens

Nachdem Sie den Sessel in Betrieb genommen haben, ist es bei diesem System ratsam, den Akku nur dann aufzuladen, wenn er fast leer ist. Sobald dies der Fall ist, gibt das System mit einem kurzen Intervall einen hohen Piepton wieder, während Sie Ihren Sessel bedienen. Wenn Sie diesen Piepton alle paar Sekunden hören, ist das Akku-System tief entladen. Um dauerhafte Schäden zu vermeiden, sollte das System sofort und für ca. 36 Stunden aufgeladen werden.

### Lademethode

- Suchen Sie den Anschluss für das Ladekabel. Dies ist ein Plastikblock (siehe Foto), der - je nach Sesseltyp - hier zu finden ist:
  - hinter dem Reißverschluss auf der Rückseite der Rückenlehne
  - am unteren Rand der Mechanik
- Lösen Sie den Block, der mit einem Klettverschluss an einer Metallplatte in Ihrem Sessel befestigt ist.
- Schließen Sie den Stecker des separat mitgelieferten Ladekabels an den Block an und schließen Sie dann Ihren Sessel an das Stromnetz (Steckdose) an. Jetzt wird das Akku-System aufgeladen, während der Sessel wie gewohnt benutzt werden kann.
- Ziehen Sie nach einer Nacht Ladezeit (oder bis zu 36 Stunden, wenn die Batterien tief entladen sind) das Ladekabel ab.



Mögliche Handbedienungen bei System 1



Ladekabel bei System 1

### Wichtig zu berücksichtigen

- Bei diesem System stoppt der Sessel nicht automatisch in der Neutralposition, wenn er von der Aufstehposition in die Entspannungsposition wechselt.
- Bei diesem System wird die Beinstütze Ihres Sessels automatisch eingefahren, wenn sich der Sessel in Aufstehposition (bei etwa 5 cm Höhe) befindet. Wenn sich der Sessel in Aufstehposition höher als 5 cm befindet, kann die Beinstütze nicht mehr ausgefahren werden.

# Akku-System 2 (Lithium Batterie)

## Die Wichtigkeit des rechtzeitigen Ladens

Obwohl das Aufladen mit diesem System immer möglich ist (Sie müssen nicht warten, bis es fast leer ist), wird empfohlen, den Akku bei normalem Gebrauch alle 2 Wochen über Nacht aufzuladen.

Das System gibt keinen Signalton aus, jedoch kann der Sessel nicht mehr bedient werden, sobald die Batterie vollständig leer ist.

## Lademethode

1. Suchen Sie den Anschluss für das Ladekabel. Dies ist ein runder Stecker (siehe Foto) und kann - je nach Sesseltyp - an folgenden Positionen gefunden werden:
  - a. hinter dem Reißverschluss auf der Rückseite der Rückenlehne
  - b. an der Unterseite der Armlehne
2. Verbinden Sie den Stecker des separat mitgelieferten Ladekabels (mit Bodentransformator) mit dem Stecker im Sessel und dann mit dem Stromnetz (Steckdose). Jetzt wird das Akku-System aufgeladen, während der Sessel wie gewohnt benutzt werden kann.
3. Das Akku-System ist nach ca. 6 Stunden aufgeladen.
4. Sie können das Ladekabel weiterhin an das Stromnetz anschließen. Das Akku-System dient dann als "Backup", wenn die Stromversorgung in Ihrer Heiminstallation unterbrochen ist.



Mögliche Handbedienungen bei System 2



Ladekabel und Bodentransformator bei System 2

## Wichtig zu berücksichtigen

1. Bei diesem System stoppt der Sessel nicht automatisch in der Neutralposition, wenn er von der Aufstehposition in die Entspannungsposition wechselt.
2. Bei diesem System wird die Beinstütze Ihres Sessels automatisch eingefahren, wenn sich der Sessel in Aufstehposition (bei etwa 5 cm Höhe) befindet. Wenn sich der Sessel in Aufstehposition höher als ca. 5 cm befindet, kann die Beinstütze nicht mehr ausgefahren werden.

# Akku-System 3 (Lithium Batterie)

## Die Wichtigkeit des rechtzeitigen Ladens

Mit diesem System ist das Laden immer möglich, jedoch ertönt ein Piepton, wenn der Akku fast leer ist. Nach dem Signalton müssen Sie das System für ca. 6 Stunden aufladen.

## Lademethode

1. Suchen Sie den Anschluss für das Ladekabel. Dies ist ein rechteckiger Stecker (siehe Foto), der sich hinter dem Reißverschluss auf der Rückseite der Rückenlehne befindet.
2. Verbinden Sie den Stecker des separat mitgelieferten Ladekabels mit dem Stecker im Sessel und dann mit dem Stromnetz (Steckdose). Jetzt wird das Akku-System aufgeladen, während der Sessel wie gewohnt benutzt werden kann.
3. Das Akku-System ist nach ca. 6 Stunden aufgeladen.
4. Sie können das Ladekabel weiterhin an das Stromnetz anschließen. Das Akku-System dient dann als "Backup", wenn die Stromversorgung in Ihrer Heiminstallation unterbrochen ist.



Handbedienung bei System 3



Ladekabel bei System 3

## Wichtig zu berücksichtigen

1. Bei diesem System stoppt der Sessel automatisch in der Neutralposition, wenn er von der Aufstehposition in die Entspannungsposition wechselt.