

Der Fitform ZEN Pflegesessel ist mit einer 3-Tasten-Kabelhandbedienung ausgestattet, über die alle Funktionen des Sessels einfach zu steuern sind. Nachfolgend beschreiben wir die **Bedienung durch die Pflegekraft / die Aufsichtsperson**.

Hinweis: die Slow Motion Schaukelbewegung stoppt automatisch nach 30 Min. Falls gewünscht, kann die Schaukelbewegung durch Drücken der unteren Taste an der Handbedienung wieder aktiviert werden.

Änderung des Benutzerprofils

Dieser Sessel verfügt über 4 einstellbare 'Benutzerprofile'. Jedes Profil besteht aus einer individuellen Kombination von Bewegungsabläufen. Die Pflegekraft kann in jeder Situation entscheiden, welches Profil der aktuellen Anforderung am besten gerecht wird. Die 4 LED Lampen auf der linken Taste der Handbedienung zeigen das eingestellte Profil an.




- Profil A der Sessel fährt **weit zurück**
- Profil B der Sessel fährt *weniger weit zurück*
- Profil C der Sessel fährt **weit zurück**
- Profil D der Sessel fährt *weniger weit zurück*

- vollständige Aufstehfunktion
- vollständige Aufstehfunktion
- eingeschränkte Aufstehfunktion
- eingeschränkte Aufstehfunktion

Das Benutzerprofil kann nur angepasst werden, wenn keine Person im Sessel sitzt. Das Umstellen ist einfach: Halten Sie beide weißen Tasten gedrückt. Der Sessel fährt in die Neutral-Position und das Benutzerprofil kann mit Hilfe der aufleuchtenden LED Lampen bestimmt werden. Lassen Sie die Tasten los, sobald die LED Lampe des gewünschten Benutzerprofils aufleuchtet. Das Profil ist nun geändert.



Änderung der Geschwindigkeit der Slow Motion Schaukelbewegung

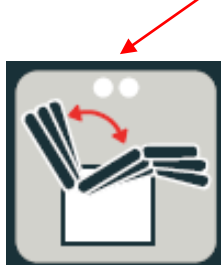

Oberhalb der Taste für die Slow Motion Schaukelbewegung befinden sich 2 LED Lampen. Leuchtet die linke Lampe, so ist die 'langsame' Schaukelbewegung eingestellt. Die rechte Lampe leuchtet, wenn die 'schnellere' Schaukelbewegung aktiviert ist. Das Umstellen der Geschwindigkeit ist einfach: Halten Sie hierfür gleichzeitig eine der beiden nebeneinander liegenden Tasten (egal welche) sowie zusätzlich die untere "Schaukel-Taste" gedrückt, bis die LED-Lampe der gewünschten Geschwindigkeit aufleuchtet. Lassen Sie nun die Tasten los. Die gewünschte Geschwindigkeit ist nun aktiviert.



Sperrern und entsperren der Funktionen



Auf der Rückseite der Rückenlehne, hinter dem Reißverschluss, befindet sich - befestigt an einem elastischem Band - ein spezieller 'Magnetschlüssel'. Hiermit können Sie den Sessel einfach sperren und entsperren. Streichen Sie mit dem Magnetschlüssel in Höhe der LED-Lampe – rechts neben der unteren Taste -mit einer sanften Bewegung von unten nach oben über die Handbedienung. Der Sessel stoppt direkt jede Bewegung ungeachtet in welcher Position er sich befindet. Um den Sessel wieder zu entsperren, wiederholen Sie diesen Vorgang. Alle Funktionen stehen nun wieder zur Verfügung.



Verhalten bei Störungen

1. Falls die Slow Motion Schaukelfunktion bei Tastendruck nicht arbeitet, prüfen Sie ob der Sessel sich evtl. in leichter Aufstehposition (oberhalb Sitzposition) befindet. Aus Sicherheitsgründen kann diese Funktion nicht im Aufstehmodus ausgeführt werden. Drücken Sie die rechte Taste ('Bewegung nach Hinten') bis die Beinstütze etwas herausgefahren ist. Betätigen Sie jetzt erneut die 'Schaukel-Taste'. Sollte die Schaukelfunktion noch immer nicht funktionieren, nehmen Sie bitte Kontakt mit ihrem Fachhändler auf.
2. Falls der ZEN-Pflegesessel nicht ordnungsgemäß funktioniert oder gar keine Reaktion zeigt, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Warten Sie ca. 10 Sekunden und stellen dann den Kontakt wieder her. Das System führt dadurch ein "Reset" durch. Die Funktionsstörung sollte behoben sein.
3. Wenn nicht, können Sie das System manuell zurücksetzen.
Schritt 1: Drücken Sie alle drei Tasten gleichzeitig für 10 Sekunden. Der Sessel geht nun in den manuellen Modus.
Schritt 2: Dann drücken Sie die oberen 2 Tasten; alle Motoren laufen nun in die 'in' Position.
Schritt 3: Drücken Sie die linke weiße Aufstehtaste, bis sich der Sessel in der Neutral-Position befindet.
Schritt 4: Drücken Sie abschließend die untere Taste mit dem Schloss, bis ein Signalton ertönt. Warten Sie, bis der Signalton aufhört; der Sessel ist einsatzbereit.

Grüne Pfeile: Funktionen die der Nutzer und die Pflegekraft bedienen können
Blaue Pfeile: Funktionen die die Pflegekraft für den Nutzer einstellen kann

